



Stoma  
Skin  
Soul




Urostomické  
pomůcky  
NovaLife TRE™

dansac 

## Pro své zdraví a pohodlí zvolte pomůcku NovaLife TRE se třemi úrovněmi ochrany.

Pro pacienty s urostomií je velmi obtížné zvládnout nepřetržitý tok moči. Hydrokoloidní kožní bariéry mohou poškodit kůži kolem stomie a vystavit ji kontaktu s močí, což zvyšuje riziko kožních komplikací kolem stomie.

Pomůcky z řady NovaLife TRE™ jsou navrženy tak, aby zastavily únik tekutiny dříve, než k němu dojde.

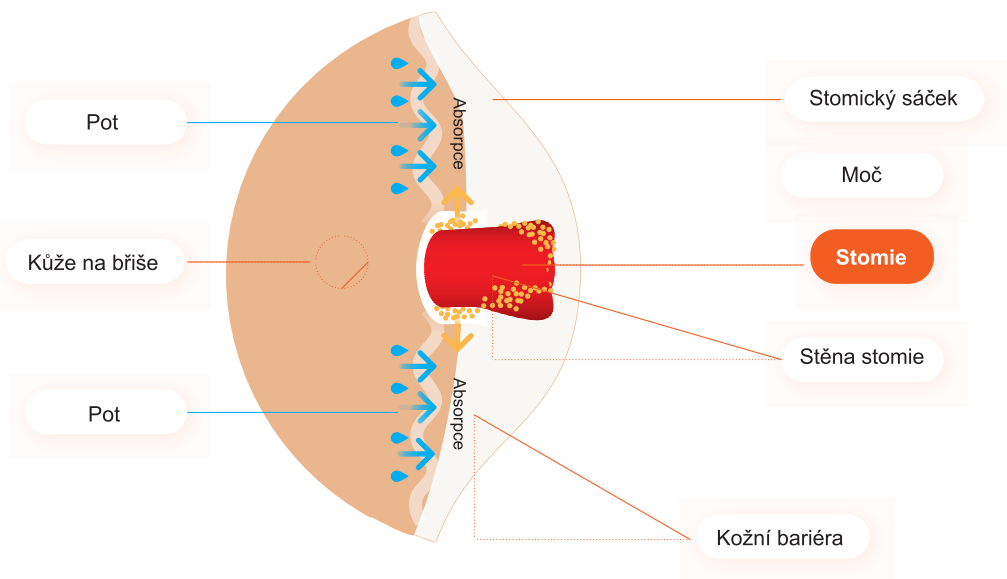

Pomůcka NovaLife TRE™ maximalizuje kontakt s pokožkou a pomáhá předcházet mezerám, které mohou způsobit únik moči. Tím snižuje riziko kožních komplikací kolem stomie.


## Kožní bariéra NovaLife TRE™ je navržena tak, aby se zvětšila a rozšířila, čímž spolehlivě utěsní jakýkoliv typ stomie.

NovaLife TRE™ je speciální pomůcka, která obsahuje látky, které se při styku s vlhkostí zvětší. Díky tomu vytvoří bezpečné těsnění kolem stomie. Pomůcka je navržena tak, aby vyplnila mezery kolem stomie a zabránila prosakování. Tím pomáhá udržet kůži kolem stomie zdravou.



Pomůcka NovaLife TRE™ se při kontaktu s močí rozšíří kolem stomie a vytvoří jedinečné těsnění, které účinně zabraňuje úniku moči.

Superabsorpční prvky technologie TRE™ dokážou zadržet velké množství vlhkosti, aniž by ztratily svou pevnost.

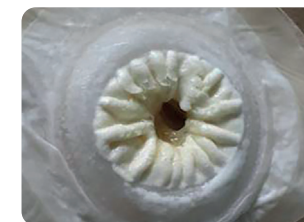

Pomůcka NovaLife TRE™ je navržena tak, aby absorbovala vlhkost a zabránila jejímu kontaktu s pokožkou. Díky tomu udržuje kůži suchou a zdravou.

Vědecké výzkumy včetně případových studií a osobní zkušenosti pacientů potvrzují vynikající fungování a velkou spokojenost s technologií TRE™.

## Vlastnosti pomůcky



### Flexibilita

Navržena tak, aby díky své pružnosti umožňovala přirozený pohyb těla.



### Tenčí provedení

**O 36 % tenčí**  
Kožní bariéra NovaLife TRE™ má tloušťku jen 0,7 mm, zatímco klasická hydrokoloidní bariéra je 1,1 mm silná.\*

\* Ve srovnání se sáčkem Nova Urostomy.



### Snadné odstranění

NovaLife TRE™ je navržena tak, aby její vyjmutí bylo snadné a šetrné k pokožce.



### Zúžení

NovaLife TRE™ se zužuje na 0,3 mm.



## 3 stupně ochrany pro zdravou kůži



### Absorpce

NovaLife TRE™ je navržena tak, aby bezpečně absorbovala přebytečnou vlhkost a poskytovala flexibilní těsnění, které pomáhá chránit pokožku.



### Přilnavost

Rozšíří se až do záhybů kůže kolem stomie, aby se dala snadno odstranit.



### Rovnovážné pH

Udržování správného pH pokožky pomáhá chránit před poškozením stomie.


Dvě vrstvy lepicí plochy jsou navrženy tak, aby zabránily zvlínění

### Primární vrstva

Vysoká absorpce v blízkosti stomie, kde je ochrana nejnütnější.

### Sekundární vrstva

Využívá standardní hydrokoloidní technologii a chrání proti vlhkosti na okraji primární vrstvy.

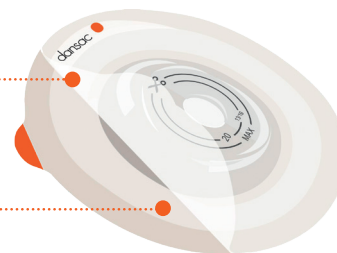

## Nové, vylepšené vlastnosti sáčku



### 1 Diskrétní body

Dva diskrétní body urostomického sáčku NovaLife™ umožňují ztenčení v horní části, což zajišťuje větší diskrétnost a pohodlí.

### 3 Chlopeň proti vyboulení

Chlopeň, která zajišťuje rovnoměrné rozmístění moči a tím zmírňuje vyboulení v dolní části sáčku.

### 5 Pohodlný obal

Jemný a voděodolný obal sáčku.

### 7 Vylepšený uzávěr, který je navržen tak, aby byl bezpečný, efektivní a snadno použitelný

- Viditelný a hmatatelný symbol ve tvaru kapky označuje, zda je vypouštěcí uzávěr otevřený nebo zavřený.
- Pohodlný a jemný kryt.
- Možnost nastavení pro bezpečné a kontrolované vyprazdňování.
- Integrovaný design uzávěru zajišťuje bezpečnost a pohodlí.
- Možnost jednoduchého zapojení do sekundárního systému.

### Tenký profil:

Díky chlopním proti vyboulení a diskrétním bodům se výrazně snižuje vyboulení sáčku.\*

\* Ve srovnání se sáčkem Nova Urostomy.

### 2 Antirefluxní chlopeň

Antirefluxní ventil výrazně zmírňuje zpětný tok moči ze sáčku do stomie.\*


### 4 Možnost náhledu EasiView™

Poskytuje diskrétnost a zároveň umožňuje sledování stomie a moči, když je to potřeba.


### 6 Design zabraňující stříkání

Konstrukce sáčku zabraňuje jeho vyboulení a zmírňuje stříkání moči při plnění. Díky tomu nabízí větší diskrétnost během každodenních aktivit.\*

\* Ve srovnání se sáčkem Nova Urostomy.

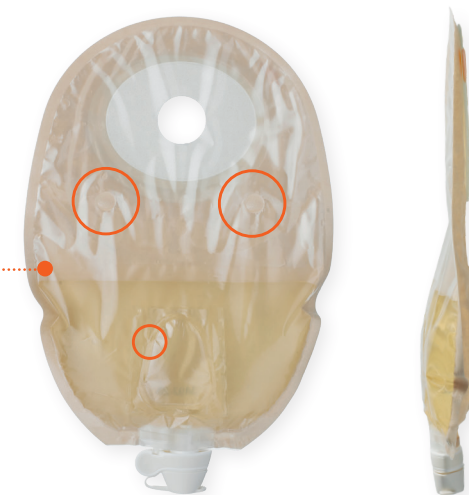

Pomůcky NovaLife TRE™ jsou navrženy tak, aby vám dodávaly pocit jistoty během dne a klid po celou noc.

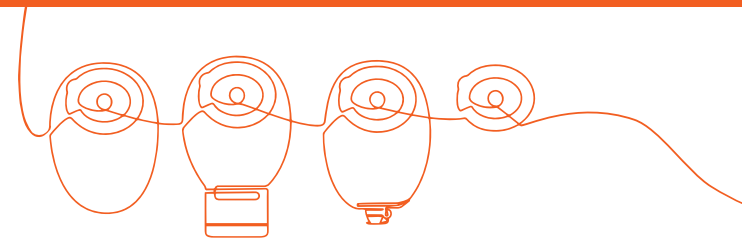

### Měkký konvex

#### DANSAC NOVALIFE TRE 1 UROSTOMY SOFT CONVEX

SÚKL KOD	ČÍSLO DANSAC	BARVA/VARIANTA	VELIKOST OTVORU	VELIKOST PODLOŽKY	PŘIBLIŽNÝ OBJEM SÁČKU	POČET KUSŮ V BALENÍ
5015754	3495-34	běžová s okénkem	15–34 mm (lze vystříhnout)	130 × 110 mm	245 ml	10 kusů
5015755	3495-44	běžová s okénkem	15–44 mm (lze vystříhnout)	130 × 110 mm	245 ml	10 kusů
5015756	3496-34	průhledný	15–34 mm (lze vystříhnout)	130 × 110 mm	245 ml	10 kusů
5015757	3496-44	průhledný	15–44 mm (lze vystříhnout)	130 × 110 mm	245 ml	10 kusů

### Konvex

#### DANSAC NOVALIFE TRE 1 UROSTOMY CONVEX

SÚKL KOD	ČÍSLO DANSAC	BARVA/VARIANTA	VELIKOST OTVORU	VELIKOST PODLOŽKY	PŘIBLIŽNÝ OBJEM SÁČKU	POČET KUSŮ V BALENÍ
5015752	3493-37	běžová s okénkem	15–37 mm (lze vystříhnout)	130 × 110 mm	245 ml	10 kusů
5015753	3494-46	průhledný	15–46 mm (lze vystříhnout)	130 × 110 mm	245 ml	10 kusů

### Plochá podložka

#### DANSAC NOVALIFE TRE 1 UROSTOMY

SÚKL KOD	ČÍSLO DANSAC	BARVA/VARIANTA	VELIKOST OTVORU	VELIKOST PODLOŽKY	PŘIBLIŽNÝ OBJEM SÁČKU	POČET KUSŮ V BALENÍ
5015750	3491-15	běžová s okénkem	15–55/70 mm (lze vystříhnout)	105 × 89 mm	245 ml	10 kusů
5015751	3492-15	průhledný	15–55/70 mm (lze vystříhnout)	105 × 89 mm	245 ml	10 kusů

### Dvoudílný sáček

#### DANSAC NOVALIFE 2 UROSTOMY

SÚKL KOD	ČÍSLO DANSAC	BARVA/VARIANTA	VELIKOST KROUŽKU	PŘIBLIŽNÝ OBJEM SÁČKU	POČET KUSŮ V BALENÍ
5015758	1417-43	běžová s okénkem	43 mm	245 ml	10 kusů
5015759	1417-55	běžová s okénkem	55 mm	245 ml	10 kusů
5015760	1418-43	průhledný	43 mm	245 ml	10 kusů
5015761	1418-55	průhledný	55 mm	245 ml	10 kusů





Cítit se pohodlně  
ve své kůži



**HARTMANN – RICO a.s.**

Kancelář Dansac  
Londýnské náměstí 2  
639 00 Brno

Tel.: +420 549 456 130–4  
Bezplatná linka: 800 100 083  
E-mail: [objednavky@hartmann.info](mailto:objednavky@hartmann.info)



Sledujte nás  
na Facebooku



[www.zivotsestomii.cz](http://www.zivotsestomii.cz)

Před použitím si přečtěte návod k použití, kde najdete informace týkající se správného použití, kontraindikací, varování, opatření a pokyny.

Dansac, logo Dansac, EasiView, NovaLife TRE a TRE jsou ochranné známky společnosti Dansac A/S. Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.  
© 2024 Dansac A/S

